

ESPECIFICACIONES

Método	Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)		
Modo de prueba	Modo Rápido, Modo Variante		
Parámetros	Modo Rápido: HbA1c, HbF Modo Variante: HbA1c, HbF, HbA2, HbS, HbC, HbD, HbE		
Prueba de velocidad	Modo Rápido: 90 Segundos/Prueba Modo Variante: 140 Segundos/Prueba		
Resultados de la primera muestra	4 Minutos		
Longitud de onda	420nm		
Tipo de ejemplo	Sangre entera, Sangre prefiltrada		
Capacidad del cargador automático	20 Tubos		
Kit de reactivos	Eluyente A, Eluyente B, Eluyente C (Modo Variante), Hemólisis Columna de cromatografía, Control, Calibrador		
Precisión	CV≤1.5%		
Capacidad de la columna	3000 Pruebas		
Filtrar	600 Pruebas		
Almacenamiento	5000 Resultados de muestra		
Rango de informe	3-18%		
Condiciones de trabajo	Temperatura: -20-55°C, Humedad: 10-93%		
Potencia de entrada	AC, 100-240V, 50/60Hz, 300VA		
Tamaño del analizador	378mm×380mm×510mm		



LABNOVATION TECHNOLOGIES, INC.

☎ +86 755 86368398 ☎ +86 755 86368398 ☎ www.labnovation.com
 📍 101 and 5th Floor, Building 1, No.68-18th Road, Guangming Hi-Tech Park, Tangjia Community,
 Fenghuang Street, Guangming District, 518107 Shenzhen, Guangdong, China.



Most Cost-effective!

LD-560

Analizador de Hemoglobina



Sistema HPLC
 Para pruebas de HbA1c
 Con eficiencia

LD-560 | Analizador Automático de HPLC




Estándar dorado de HPLC para pruebas de HbA1c


-  Alta Eficiencia
-  Alta Resolución
-  Alta Sensibilidad
-  Excluyendo la interferencia de hemoglobinas variantes e inestables

El analizador de HbA1c totalmente automatizado LD-560 utiliza el método de cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC), un estándar de oro que informa el rendimiento más rápido disponible de resultados de HbA1c en solo 90 segundos, con detección de variantes de Hb, lo que brinda la solución sobresaliente para un diagnóstico rápido y confiable seguimiento diabético.

Datos de rendimiento

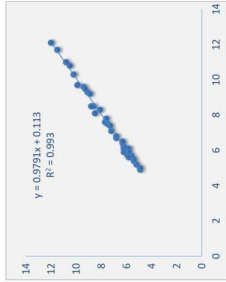

Correlación entre LD-560 y Bio-Rad D-10

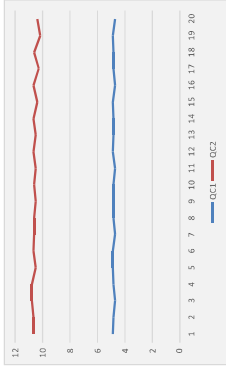


Estudio de Precisión



Automatización completa

- Cargador automático para 20 tubos
- Escaneo automático de código de barras
- Muestreo de tubo primario con perforación de tapa

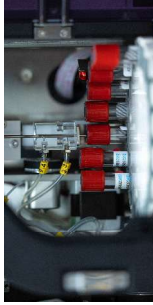

Rápido y preciso

- Método HPLC para pruebas de HbA1c
- CV≤1,5%
- Hasta 40 muestras/hora
- Modo de prueba: modo rápido, modo variante



Operación conveniente

- Pantalla táctil LCD de 10" para brindar información rica
- Lavado automático para automantenimiento al inicio
- Un clic para comenzar a probar
- Reactivos fáciles de cambiar



Rendimiento de calidad

- Certificación IFCC y NGSP
- Control y Calibrador del fabricante original
- Kit de reactivos: Eluyente A, Eluyente B, Eluyente C, Columna, Control, Calibrador

Mediciones de alta precisión

